

## **Pingouin : Aspirateur de mucosité pour bébé**

Réf. **SOC-98600060**



### **Caractéristiques de l'aspirateur de mucosité bébé :**


- Marquage CE: ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42 / CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2007/47 / CE du Conseil.
- Force de l'aspiration: Dépendance de la taille de la main et de la technique employée,
- Aspiration maximale de 50 à 150 mmHg (70-200 cm H<sub>2</sub>O). Soit une moyenne de 100 mm Hg [136 cm H<sub>2</sub>O].
- Matériel: Silicone
- Taille: 13,3 x 5,22 x 4,95 cm.
- Poids: 0.058 kg.
- Contenance: 75 ml.
- Ne contient pas de latex.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Pingouin : Aspirateur de mucosité pour bébé

Les bébés n'ont pas la possibilité de se moucher ni de se déboucher la gorge. L'aspirateur Pingouin été conçu pour nettoyer les voies aériennes des bébés.

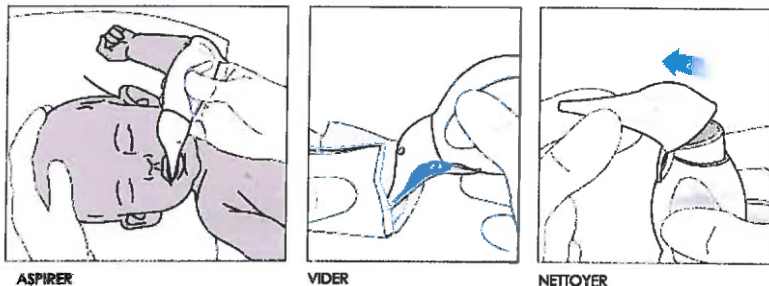

### "Pingouin", aspirateur de mucosité pour bébé

Les voies nasales des bébés peuvent être bloquées pour de multiples raisons telles que l'exposition aux virus ou encore à cause d'irritations dues à des allergènes. Des voies respiratoires bouchées peuvent occasionner une gêne au niveau de la respiration ou rendre difficiles l'ingestion d'aliments, notamment chez les jeunes nourrissons.

Conçu pour dégager les voies aériennes, le "Pingouin" est équipé d'un bec de silicone, facile à nettoyer et capable de résister à plusieurs centaines d'utilisations. Ce produit a été développé dans le cadre de l'apprentissage de gestes de bases pour la réanimation des nouveaux nés dans les pays en voie de développement.

#### Aspirer :

Pressez le "Pingouin" et conservez la pression

Insérez le bec dans le nez ou la bouche du bébé

Relâchez lentement la pression exercée sur le "Pingouin"

Retirez le "Pingouin" du nez ou de la bouche du bébé

#### Vider :

Videz le contenu du "Pingouin" dans le lavabo, ou dans une serviette prévue à cet effet

Répérez l'aspiration si nécessaire

#### Nettoyer :

Ouvrir en pliant le cou du "Pingouin"

Laver et frotter à l'eau savonneuse

Rincez abondamment le bec et la tête du "Pingouin"

Plongez le "Pingouin" dans de l'eau bouillante pendant au minimum 10 minutes

Laisser sécher

\* Le "Pingouin" peut également être désinfecté à l'aide de produits désinfectants.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration