

Sécheuse de films radiologiques

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

Leader de la distribution du matériel médical



Utilisation

La sécheuse pour 40 porte films de dimension maximum 35 x 43 cm (14" x 17") peut être chargée par l'avant avec son support extensible; Le support est réglable pour accepter des barres de suspension de 40,5 cm ou 46 cm.

Ne charger que des films ne gouttant plus.

- ✚ Le temps de séchage peut être réglé par le minuteur placé dans le coin inférieur gauche devant la grille à air.
- ✚ La température de la sécheuse est contrôlée par un thermostat et est pré-réglée à environ 32°C en usine et ne devrait pas être modifiée.
- ✚ Mettre l'unité dans une pièce sèche et si possible ventilée.
- ✚ L'unité est équipée d'un ventilateur sans entretien.
- ✚ Nettoyer de temps à autre le filtre devant la grille à air.

Données techniques

- ✓ Tension: 230 V (+/- 10%)
- ✓ Fréquence secteur: 50 Hz
- ✓ Puissance: environ 1.000 W
- ✓ Minuteur: réglable de 0 à 60 minutes
- ✓ Temps de séchage: 40 de 60 minutes
- ✓ Câble d'alimentation: 1,5 m avec prise SCHUKO
- ✓ Capacité: 40 porte films taille max. 35 x 43 cm (14" x 17")
- ✓ Espace nécessaire: 60 x 50 x 180 cm
- ✓ Poids Net: 50 kg



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com