

## **Civière de relevage aluminium**

Réf : SOC- 506301



La civière de relevage est conçue pour assurer une immobilisation et un transfert en toute sécurité des patients.

Munie d'un dispositif d'ouverture centrale permettant de glisser les deux parties longitudinales de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger le patient. L'immobilisation du patient est parfaite.

La longueur est adaptable en 3 positions avec verrouillage automatique et sécurisé par goupille à ressort.

La civière se plie en deux pour un stockage aisé. La surface du plan de couchage rainurée concave.

### **Caractéristiques techniques**

Dimensions (Lxlxh) Dépliée 167.5 à 204 x 45 x 7 cm. Pliée 120 x 45 x 8,4 cm

Dimensions dépliée (Lxlxh) : de 167,5 à 204 x 45 x 7 cm

Dimensions pliée (Lxlxh) : 120 x 45 x 8,4 cm

Couleur : Gris

Conforme 10g : Non

Matière : Aluminium

Poids : 8,6 kg

Charge maximale admissible : 159

Livré avec : 3 sangles de maintien 2 parties polypropylène noir (avec boucle métal à déverrouillage rapide) 130 cm. Système de serrage par coulissement

Instructions d'utilisation : La civière de relevage est munie d'un dispositif d'écartement permettant de glisser les deux parties de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger la victime.

Ouvrir la civière, pousser les 2 boutons vers l'extérieur. Ajuster la longueur de la civière à la taille du patient et verrouiller les boutons de réglage.

Poser la civière à plat, dégager les boucles et les sangles, déverrouiller les extrémités. Glisser la civière sous le patient, verrouiller les extrémités, ajuster les sangles.

Entretien : Nettoyage avec un chiffon ou une brosse souple. Utiliser de l'eau propre ou du produit de nettoyage neutre.

Désinfection avec un produit en spray ou une lingette prévus à cet effet.

Vérifier la civière et les fixations des vis chaque semaine.