

Dispositif de thérapie positionnelle, Modèle SOMNIBEL PRO



DESCRIPTION

Il s'agit d'un dispositif compact et léger, fixé sur le front, qui applique une légère vibration lorsque le patient dort sur le dos, pour l'inciter à changer de position. De nombreuses études cliniques considèrent la thérapie positionnelle comme une solution efficace contre le SAOS positionnel, qui permet d'obtenir des résultats similaires au traitement par PPC.

Le Somnibel est indiqué pour des patients de plus de 18 ans, 45kg. et 145cm.

FONCTIONNEMENT

Vous positionnez Somnibel sur son clip adhésif, puis vous le placez sur le torse ou sur le front.

Vous pouvez vous allonger et vous endormir tranquillement, dans votre position préférée. Somnibel ne se déclenche pas avant 30 mn.

Puis dans la nuit, après plus de 30 secondes sur le dos, Somnibel émet une vibration qui ne vous réveille pas, mais qui stimule votre cerveau. On appelle cela un micro-éveil. Un passage sur le côté finit par s'opérer. Somnibel arrête de vibrer. La nuit peut se poursuivre normalement.

Et tout cela sans vous réveiller !

LIVRE AVEC

- Un dispositif positionnel Somnibel Pro
- Une Clé USB comprenant le logiciel Somnilab
- Un chargeur 220V
- Un câble USB de branchement
- Un jeu de 30 clips adhésifs
- Une notice d'utilisation