

**FICHE PRODUIT**



## Débitmètre Peak-flow Modèle PINNACLE

Référence : SOC-3401065976540

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Caractéristiques techniques du débitmètre de pointe:

- Précision +/- 10L/min ou +/- 10%
- Résistance au débit < 0,35 kPa/l/s.
- Mesures exprimées en valeurs BTPS.

### Mode d'emploi :

1. Placer le curseur dans la zone bleue.
2. inspirer le plus profondément possible, le menton levé.
3. Mordre légèrement l'embout.
4. Souffler aussi FORT et aussi VITE que possible. Recommencer l'opération 2 fois, en se reposant entre chaque souffle.
5. Penser à photocopier la grille avant usage. Après avoir noté la date, inscrire le meilleur résultat des 3 souffles, indiqué par la partie haute du curseur.

**IMPORTANT** : si vous constatez une baisse significative des résultats, consultez votre médecin.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

**Restrictions d'utilisation :**

- Ne pas souffler comme dans une sarbacane.
- Ne pas gêner la course du curseur.
- Ne pas boucher les sorties d'air.
- Ne pas desserrer les vis.

**Nettoyage :**

- L'appareil doit être régulièrement nettoyé.
- Plongez-le dans une eau tiède légèrement détergente comme de l'eau savonneuse (donc pas chaude et surtout pas à ébullition).
- Rincez et laissez sécher à l'air libre.

**Entretien :** Le débitmètre de pointe ne requiert pas d'entretien particulier autre que le nettoyage. Il doit être conservé dans un endroit sec et propre.

**Contenu :**

- 1 débitmètre de pointe.
- 1 Lot de 100 embouts buccaux à usage unique.
- 1 notice d'utilisation (avec grille de notation des résultats).

**Conformité et garantie**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**Page produit**

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/10899-peak-flow-debitmetre-de-pointe.html>


**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit

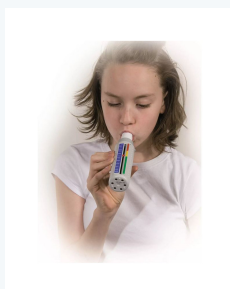

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)