

FICHE PRODUIT

Inhalateur plastique

Référence : SOC-1620005

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Inhalateur plastique

- **Inhalateur en polypropylène et PEHD.**
- **Capacité:** 600 ml, en 2 parties.
- **Peut être désinfecté** dans un lave-bassin.
- **Stérilisation** : Oui, Oxyde d'éthylène.
- **Nettoyage:** Oui, Avec un chiffon humide ou avec de l'alcool à 70°. Décontaminable en lave bassin.
- **Substance impropre** : Ne pas utiliser de produits attaquant le PP ; comme l'acétone.
- **Pièces constitutives** : Oui Une partie haute et une partie basse s'emboitant.
- **Matières** : PP
- **Étiquetage:** Non
- **Emballage:** Oui Sous film plastique
- **Stockage particulier** Oui Sec et propre à l'abri du soleil
- **Marquage sur le D** Oui Fabrication française PP
- **Diamètre(mm)** 130
- **Hauteur (mm)** 220
- **Résistance température (C°)** -40 à 90°C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Poids net (g)** 150
- **Volume** 0.6 litre
- **Couleurs** Blanc

Utilisation: Dispositif permettant l'inhalation de vapeurs.

Mode d'emploi :

Ouvrez la partie basse et verser le liquide chaud et non bouillant pouvant émettre des vapeurs , si nécessaire rajouter un produit actif dans le liquide. Refermer avec le couvercle et inhaler par le nez par l'ouverture. Après dissipation des vapeurs, jeter le liquide et rincer avec de l'eau.

Précaution d'emploi :

Ne pas mettre d'eau bouillante risque de brûlure. Ne pas être en contact directement avec l'eau chaude, respirer uniquement les vapeurs. Pour les produits actifs veuillez vous mettre en relation avec votre médecin ou votre pharmacien.

Recyclage: Oui

Récupération : Dans des containers à plastique.

DEEE/REACH : Non/ Non

PVC/ PHTALATES: Non/Non

Données de sécurité Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-ori-medical/12941-inhalateur-plastique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com