

FICHE PRODUIT

Thermomètre Electronique Frontal Colson Flash Temp

Référence : SOC-CC74902

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le thermomètre électronique frontal Colson Flash Temp permet une mesure infrarouge, sans contact avec la peau.

La manière la plus facile, la moins traumatisante et la plus rapide pour mesurer la température corporelle. La mesure s'affiche sur l'écran à cristaux liquides après un simple balayage pendant quelques secondes de la zone sourcilière, SANS CONTACT AVEC LA PEAU.

Le thermomètre électronique frontal Colson Flash Temps mesure l'énergie infrarouge émise par le front mais aussi celle émise par les objets.

Cette énergie est recueillie par une lentille puis convertie en une indication de température.

Avantages du thermomètre électronique frontal colson flash temp

- Température sans contact sûre et hygiénique
- Ecran rétro éclairé
- Indicateur lumineux de fièvre (écran rouge ou vert), alarme de fièvre
- Mémoire des 30 dernières mesures,
- Arrêt automatique après 60 secondes de non utilisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Multi-usages (mode corporelle et mode objet)
- Livré avec socle et housse de rangement
- Alimentation 2 piles AAA fournies

Caractéristiques techniques du thermomètre électronique frontal colson flash temps

TYPE: Thermomètre électronique frontal Colson Flash Temp

PLAGE DE MESURE: Mode corporel : 34.0°C à 42.2°C; Mode objet: 0°C à 100°C

RESOLUTION : 0.1°C

PRECISION: En laboratoire : $\pm 0.2^\circ\text{C}$ entre 36.0°C et 39.0°C

AFFICHAGE: Ecran à cristaux liquides, 4 chiffres plus symboles spécifiques.

SIGNEAUX SONORES

L'appareil est allumé et prêt pour la mesure : 1 signal court.

Mesure terminée : 1 signal long.

Erreur ou dysfonctionnement : 3 signaux courts.

Température égale ou supérieure à 37,8°C : 10 signaux courts.

MEMOIRE

Auto-affichage de la dernière mesure.

Rappel de 30 mesures en mode mémoire.

RETRO-ECLAIRAGE

L'écran est éclairé en vert pendant 4 secondes lors de la mise en marche.

L'écran se rallume pendant 5 secondes lorsque la mesure est effectuée : En vert si la mesure est inférieure à 37,8°C .

En rouge si la mesure est égale ou supérieure à 37,8°C.

TEMPERATURES

de fonctionnement : mode corporel : 16°C - 40°C - mode objet : 5°C à 40°C.

de stockage/transport : -20°C - +50°C.

ARRET AUTO

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

60 secondes environ, après la fin de la mesure.

DETAILS

Alimentation: 2 piles 1,5 v AAA.

Dimensions : 150 mm x 40 mm x 39 mm.

Poids : 81 g avec pile – 56 g sans pile.

Normes : Conforme aux exigences de ASTM E-1965 ; IEC 60601-1 ; IEC 60601-1-2 (EMC).

Produit conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/EEC.

Contenu du pack thermomètre électronique frontal colson flash temp

- 1 thermomètre électronique frontal Colson Flash Temp
- 1 Socle
- 1 Housse souple de rangement

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/14152-thermometre-electronique-frontal-colson-flash-temp.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com