

FICHE PRODUIT

Kit Lecteur de glycémie (Glucomètre) ON CALL PLUS II avec sac de transport

Référence : SOC-G241110

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit Lecteur de glycémie (Glucomètre) ON CALL PLUS II avec sac de transport**Pour surveiller son taux de glycémie**

Ce kit lecteur de glycémie **ON CALL PLUS II** est un **glucomètre de pointe**. Il est destiné aux mesures quantitatives de **glycémie** à l'aide des **bandelettes réactives**. A chaque contrôle, il indique avec **précision** et **fiabilité** le taux de sucre dans le sang en milligrammes par décilitre (mg/dl). Ce lecteur glycémique est fourni avec 10 bandelettes, 01 puce d'étalonnage, 01 solution témoin, 10 lancettes stériles, 01 stylo **autopiqueur**, **01 embout transparent (pour avant-bras ou paume de main)**, **01 sac de transport** et le **manuel d'utilisation**.

Caractéristiques du lecteur de glycémie

- Résultat précis en 5 secondes
- Echantillon de 0.5µl seulement
- Etalonnage automatique à puce
- Résultats d'étalonnage du plasma
- Gestion avancée des données avec moyenne sur 7, 14 et 30 jours
- Economique pour des analyses fréquentes
- Souple pour piqure sur l'avant-bras, la paume ou le doigt

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques :

- Plage de mesure : 20 – 600 mg/dL ou 1.1 – 33.3 mmol/L
- Sites de piqûre - taille Doigt, avant-bras ou paume - 0,5 µl
- Durée analyse Environ 5 secondes
- Alimentation Une pile bouton de 3,0 V 2032 ou équivalente
- Durée de la pile 12 mois ou environ 1 000 analyses
- Mémoire Jusqu'à 300 enregistrements avec date et heure
- S'utilise avec des bandelettes spécifiques de glucose et des lancettes 28G vendues séparément

Conseils d'utilisations :

- Se laver les mains
- Insérer la bandelette réactive dans le lecteur. Le lecteur de glycémie s'allume et émet un bip
- Piquer l'extrémité du doigt à l'aide de l'autopiqueur
- Mettre la goutte de sang en contact avec le bord avant de la fenêtre jaune de la bandelette. Le lecteur émet un bip et un sablier clignote dès qu'une quantité suffisante de sang a été aspirée par la bandelette.
- Le résultat s'affiche en 5 secondes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glucometres/16128-kit-lecteur-de-glycemie-glucometre-on-call-plus-ii-avec-trousse-de-rangement.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com