

FICHE PRODUIT

Bande plâtrée Cellona Xtra - Prise rapide

Référence : SOC-8107

Description du produit

Bande plâtrée Cellona Xtra - prise rapide

Les **bandes plâtrées Cellona Xtra** sont principalement utilisées pour **immobiliser un membre fracturé**, après interventions chirurgicales et corrections orthopédiques, pour le traitement des maladies articulaires et osseuses.

Aisément modelable

Aisément modelables, elles sont recommandées pour les **immobilisations qui demandent une application rapide** et la réalisation de grands bandages (plâtre bassin-jambe ou corset plâtré).

Mise en œuvre

La bande se plonge entièrement dans une eau entre 20 et 25°C pendant 3 à 4 secondes. **Temps de prise moyen de 2,5 minutes**, mise en charge après 30 minutes, durcissement complet après 24 heures. La bande Cellona Xtra est **transparente aux rayons X**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18784-bande-platree-cellona-xtra-prise-rapide.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 6 cm x 3 m	SOC-070541	
Dimensions - 10 cm x 3 m	SOC-070542	
Dimensions - 15 cm x 3 m	SOC-070543	
Dimensions - 20 cm x 3 m	SOC-070544	
Dimensions - 30 cm x 3 m	SOC-070545	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com