

**FICHE PRODUIT**



## Pince à disséquer, avec griffe, 15 cm

Référence : SOC-GEU-255115

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

Pince à disséquer.

Type: Avec griffe

Longueur: 15 cm

### Consignes générales :

Tout instruments neuf doit être nettoyé, désinfecter et stériliser avant une première utilisation.

Après leur utilisation, nettoyer, désinfecter et stériliser les instruments aussi rapidement que possible.

Tous les instruments usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des dommages quelconques doivent être jetés et détruit.

### Nettoyage, désinfection :

Pour la désinfection et le nettoyage, toujours respecter scrupuleusement le dosage, le temps d'application et les températures conseillés.

Les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons sont à éviter. Veillez à placer

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

les produits sans risques de zones d'ombres.

Il est totalement interdit d'utiliser des brosses ou des éponges métalliques pour le nettoyage manuel.

Rincer minutieusement après le lavage en utilisant de l'eau déminéralisée dans la mesure du possible.

Sécher les produits avec soin après le rinçage.

### **Stérilisation :**

Ne pas oublier que la stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection.

Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.

Il est recommandé de stériliser les instruments dans un autoclave à vapeur.

- Température : 134°C
- Pression : 2 bars
- Durée : 18 minutes Laisser refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage.

Dans tous les cas et avant tout, respecter les consignes réglementaires et celles du fabricant relatives à la stérilisation et à l'utilisation des autoclaves.

## **Conformité et garantie**



Marquage CE

### **Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## **Page produit**

<https://www.socimed.com/pince-a-dissequer/317-pince-a-dissequer-avec-griffe-15-cm.html>



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com