

FICHE PRODUIT



Ventouse obstétricale Manuelle: Pompe manuelle + Set 3 ventouses Ø 40/50/60

Référence : SOC-0770058

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

• Ventouse obstétricale Manuelle: Pompe manuelle + Set 3 ventouses Ø 40/50/60

Pompe manuelle pour extraction:

- Une bouteille en plastique, 500 ml
- Manomètre • Panier plastifié
- Tuyaux en silicone transparents, 50 cm et 150 cm
- Set 3 ventouses Bird Ø 40/50/60

• Note importante sur l'utilisation des Ventouse obstétricale

Le praticien qualifié est responsable des procédures et interventions chirurgicales appropriées à chaque patiente. Il incombe à chaque médecin d'évaluer la convenance des procédures à appliquer, en fonction de sa formation et son expérience individuelle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

• Indications

- Etat du fœtus inquiétant.
- Accouchement spontané impossible malgré un déroulement normal de la deuxième phase
- Détresse fœtale dans la deuxième phase
- Circonstances ne permettant pas une pression volontaire pour l'expulsion
- Efforts insuffisants de la mère pour expulser
- Retard maternel au cours du second stade
- Raccourcissement du second stade

• Conditions d'utilisation

- Enfant à terme, grossesse de plus de 36 semaines
- Présentation du vertex
- Rupture des membranes
- Dilatation complète du col
- Engagement complet de la tête
- Vessie et rectum maternels vides

• Contre-indications

- Présentation par le siège
- Présentation par le front ou la face
- En cas de saignement au niveau du site de prélèvement du sang fœtal
- Suspicion de disproportion céphalopelvienne (Mauvais rapport entre bassin maternel et tête de l'enfant)
- Dilatation insuffisante du col
- Grossesse de moins de 36 semaines
- Estimation du poids du fœtus < 2500 g
- Tête du fœtus non engagée, palpable dans l'abdomen
- Double désinsertion de la ventouse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lésions du scalp du fœtus
- Echec de l'extraction antérieure sous vide ou par forceps
- Les os du fœtus indiquent une déminéralisation
- Coagulopathie fœtale connue
- Suspicion de macrosomie ou risque de dystocie de l'épaule

- **Mesures de précaution**

Conditions nécessitant une observation soigneuse:

- Blessures de la tête du fœtus
- Traction considérable pendant l'accouchement
- Chaque traction de la ventouse doit entraîner une descente de la tête
- Si tel n'est pas le cas, interrompre l'extraction sous vide
- Interruption de l'extraction sous vide.

Ces recommandations ne sont que des directives générales. Les utilisateurs doivent suivre les directives actuelles institutionnelles et médicales qui traitent de l'utilisation des ventouses et des systèmes d'extraction.

- **Technique**

1. Il faut évaluer soigneusement la position de la tête du fœtus et de la fontanelle postérieure.
2. La tête doit être engagée à fond abdominalement et, lors de l'examen du vagin, devrait se trouver au niveau des structures périnéales, ou juste au-dessus de celles-ci.
3. Ventouse à usage unique bird / Ventouses en acier inoxydable: Il est possible de placer la patiente en position gynécologique, mais l'accouchement peut également être réalisé en position dorsale, latérale gauche ou accroupie.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ventouses-obstetricales/5298-ventouse-obstetricale-manuelle.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com