

FICHE PRODUIT

Cabine sécheuse de films radiologiques 20 radios

Référence : SOC-213020

Points forts

- délais : 3 semaines
- Garantie : 1

Description du produit

• Utilisation

La sécheuse pour 20 porte films de dimension maximum 35 × 43 cm (14" × 17") peut être chargée par l'avant avec son support extensible; Le support est réglable pour accepter des barres de suspension de 46 cm.

- Ne charger que des films ne gouttant plus.
- Le temps de séchage peut être réglé par le minuteur placé dans le coin inférieur gauche devant la grille à air.
- La température de la sécheuse est contrôlée par un thermostat et est préréglée à environ 32°C en usine et ne devrait pas être modifiée.
- Mettre l'unité dans une pièce sèche et si possible ventilée.
- L'unité est équipée d'un ventilateur sans entretien.

Nettoyer de temps à autre le filtre devant la grille à air.

• Données techniques

- Tension: 230 V (+/- 10%)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fréquence secteur: 50 Hz
- Puissance: environ 500 W
- Minuteur: réglable de 0 à 60 minutes
- Temps de séchage: 40 de 60 minutes
- Câble d'alimentation: 1,5 m avec prise SCHUKO
- Capacité: 20 porte films taille max. 35 × 43 cm (14" × 17")
- Espace nécessaire: 60 × 50 × 90 cm
- Poids Net: 27 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/secheuse-de-films/5499-cabine-secheuse-20-radios.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	3 semaines
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com