

FICHE PRODUIT

Autoclave Vertical 424 Litres

Référence : SOC-STF424

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Stérilisateur : autoclave sur pied : 424 LITRES MODELE SOC-STF424 STERIFLEX

Indication :

Affiche les stages d'évolution du processus de stérilisation lorsque la machine est en fonction.

Fonction de stérilisation pratique:

- La fonction d'aspiration pré réglée est capable de réduire le temps de stérilisation.
- La fonction de séchage permet d'évacuer rapidement l'humidité indésirable et d'atteindre le critère « Bowie Dick ».
- Vêtement/appareil/liquide/etc ; Le changement du mode de fonction de stérilisation se fait en raison des différents types de matériel à stériliser.
- Dispositif d'alimentation en eau automatique : le système de contrôle électrique est capable de détecter et d'évaluer automatiquement le volume d'eau. Lorsque ce volume est insuffisant, il approvisionnera le stérilisateur en réhaussant le niveau d'eau. Utiliser le matériel pour la purification de l'eau douce peut prolonger le cycle de vie du stérilisateur.

Les mécanismes de sécurité :

- **Un Mécanisme automatique de protection et d'instinction en cas de pénurie d'eau :**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Lorsque l'eau vient à manquer, le système de contrôle électrique arrêtera automatiquement la fonction de chauffage pour empêcher le système de surchauffer, de secher ou pire, de fondre.

- **Un Contrôleur de pression** : la pression maximale dans la chaudière est limitée à 2.2 ± 0.1 kg/cm². Lorsque la pression atteint cette valeur établie, la puissance de chauffage est immédiatement arrêtée pour éviter une augmentation drastique de la pression.

Une valve de sécurité : lorsque la pression atteint le seuil de 2.8kg/cm², la valve commencera une évacuation rapide de la vapeur et relachera la pression de la chambre.

- **Un verrou de pression** : Lorsque la pression de la chambre interne dépasse 0.2kg/cm², l'embrayage sera automatiquement scellé pour préserver la sécurité de l'appareil ; et il sera alors impossible d'ouvrir la porte .
- **Un poussoir de porte sécurisée** : lorsque la porte est ouverte , il est impossible à la vapeur de la chambre externe de pénétrer dans la chambre interne. Le stérilisateur ne peut fonctionner normalement, à moins que la porte ne soit hermétiquement fermée.

Interface d'opération simple :

1. Un chronomètre électronique digital LED contrôle la durée de

la stérilisation et du séchage de 0 à 99 minutes.

1. Un contrôleur électronique de température digital LED établit la température de travail requise rapidement, et montre l'état actuel de la température de la chambre interne. Le seuil de température le plus élevé est de 134°C. (218.47°F)
2. Un enregistreur de température permet de surveiller et d'enregistrer le temps et la température pendant toute la durée du processus de stérilisation.
3. La jauge de pression des chambres interne et externe est capable de montrer avec précision l'état actuel de la température de travail à l'intérieur du stérilisateur.
4. L'ouverture et la clôture de la porte pivotante sont faciles à effectuer.

Le degré le plus élevé de la température de stérilisation est de 134°C et la valeur de la pression de stérilisation est capable d'atteindre 2.02 kg/cm² (2.16 bar ou 31.29psi).

Le système de chauffage à pleine puissance nécessite 20 minutes pour achever la stérilisation à 121°C ou 15 minutes à 132°C

Étapes préparatoires pour la fonction de stérilisation indiqués comme suit :

Opération complètement automatique :

- Mettre les éléments à stériliser à l'intérieur et fermer la porte

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- choisir le mode (vêtement, appareil, liquide, etc.)/ température/temps
- Appuyer l'interrupteur ; allumer.
- Approvisionnement en eau automatique
- L'aspirateur de chauffage pré-réglé pour trois usages.
- Stérilisation
- vacuation de la vapeur de la chambre interne
- Fin du séchage par aspiration.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/5928-autoclave-vertical-424-litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com