

**FICHE PRODUIT**

## Centrifugeuse microhématocrite, Modèle Hettich 200, avec rotor 24 places

Référence : SOC-H200

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

#### Centrifugeuse microhématocrite, Modèle Hettich 200

Détermine l'hématocrite en seulement quelques minutes - des résultats rapides et fiables grâce à la forte accélération. Une centrifugeuse compacte et performante utilisée pour déterminer le pourcentage du volume occupé par les érythrocytes dans le sang. Cette centrifugeuse performante sépare les échantillons en quelques minutes seulement : avec une accélération centrifuge de  $16\,060 \times g$ , elle met moins de sept minutes pour concentrer au maximum les globules rouges et obtenir ainsi un plasma acellulaire pour d'autres examens. Vous pouvez centrifuger jusqu'à 24 tubes capillaires par cycle. Le rotor segmenté offre à chaque capillaire son propre compartiment. Cela présente l'avantage d'éviter une réaction en chaîne en cas de rupture de l'un des capillaires et donc la détérioration des autres tubes. Les éclats de verre et le sang du tube capillaire endommagé sont retenus par un système tampon fixé sur le bord extérieur de chaque segment qui sert simultanément d'appui au tube capillaire. Ces dispositifs sont faciles à nettoyer et peuvent être remplacés. Après sédimentation, la valeur de l'hématocrite peut être lue à l'aide du couvercle du rotor qui sert également de disque de lecture. Il n'est pas nécessaire pour cela de sortir les tubes capillaires, ce qui permet d'économiser du temps et offre une plus grande sécurité.

Grâce à ses caractéristiques, cette centrifugeuse peut être utilisée en néonatalogie, hématologie et

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

médecine sportive. La centrifugeuse à hématocrite est également utilisée en néonatalogie pour extraire le plasma afin de déterminer de manière photométrique le taux de bilirubine dans le sang des nouveau-nés.

**Caractéristiques techniques de la centrifugeuse microhématocrite, Modèle Hettich 200:**

- Un boîtier métallique stable
- Couvercle intérieur en métal
- Une cuve profonde en métal qui offre un logement sûr au rotor
- Panneau de commande pratique : la durée et la vitesse peuvent être réglées rapidement et sans difficulté
- La vitesse de rotation et le temps restant sont affichés sur l'écran pendant le cycle
- Système de verrouillage du couvercle
- Sécurité anti-chute du couvercle
- Déverrouillage d'urgence simple en cas de coupure de courant
- Cuve profonde en métal
- Arrêt en cas de déséquilibre

**Centrifugeuse sans rotor**

- Dimensions (h x l x p): 228 x 262 x 352 mm
- Poids: env. 10 kg

**Avec Rotor**

- Capacité max.: 20 / 24 capillaire
- RPM max.: 13'000 min-1
- ACR max.: 16'060

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/6875-centrifugeuse-microhematocrite-modele-hettich-200.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 1         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

## Photos du produit



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com