

FICHE PRODUIT

ANIOSYME X3, Doses de 25 ml

Référence : SOC- ANI2633097FG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Indications

- Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel d'endoscopie. Nettoyage en bacs à ultrasons.

• Caractéristiques

- Complexe tri-enzymatique combiné à un tensioactif non ionique nouvelle génération
- Efficacité démontrée (PND*) * Pouvoir Nettoyant Dégraissant
- Stabilité enzymatique prouvée
- pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium
- Formulé sans chlorure : effet anticorrosif vis-à-vis des matériaux
- Compatible avec les ultra-sons
- Liquide limpide bleue
- pH du produit pur : 8.2 +/- 0.2
- pH à 0.5% eau déminéralisée : 6.3

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- pH à 0.5% eau brute : 7.5
- Réduction de 57% d'émissions des gaz à effet de serre comparé à un produit de même indication
 - **Efficacité anti-microbienne optimisée dès 5 minutes**
- Actif sur les bactéries, les virus, les levures
 - **Mode d'emploi**
- **Dilution à 0,5 %** Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.
- Immerger complètement le dispositif médical. **Temps de trempage minimum conseillé : 5 min.** Brosset si nécessaire.
- Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique).
- Essuyer avec un chiffon propre. Passer à l'étape suivante
 - **Conditionnement**
- 200 doses de 25ml

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/7371-aniosyme-x3-doses-de-25-ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com