

FICHE PRODUIT

Détergent désinfectant **SURFA'SAFE** Premium, capot rouge

Référence : SOC-AN2419326

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- Concept brevetée
- Efficacité antimicrobienne rapide : bactéries y compris BHR, Rotavirus...dès 2 min.
- Large compatibilité avec les matériaux

INDICATIONS

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...).

CARACTERISTIQUES

- Nettoyant et désinfectant en 1 seule opération
- Sans substance CMR, sans alcool, sans parfum ni colorant
- Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dispenseur de mousse compacte afin de limiter la formation d'aérosol et la volatilité des composants (750 ml)
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas ...)
- Mousse dense pour une meilleure adhérence aux surfaces (750 ml)
- Séchage des surfaces rapide et sans trace
- Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, suivi d'un rinçage
- Amélioration du profil écotoxicologique : réduction des émissions de GES* de 7% par rapport à un produit de même application
- pH : 6 +/- 0.5

COMPOSITION

Chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage : entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4) - usage réservé aux professionnels.
Dispositif médical de la classe IIA (Directive 93/42/CEE modifiée).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, EN 13697 Selon EN 13727 : actif sur ERV, A. baumannii β LSE, E. coli OXA 48, E cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis Selon EN 13697 : actif sur ERV, A. baumannii β LSE, E. coli OXA 48, E cloacae OXA 48, SARM, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis	2 minutes 1 minute 2 minutes
Levures	EN 1275, EN 13697 EN 13624	5 minutes 2 minutes
Moisissures	EN 1275, EN 13624, EN 13697 Selon EN 13624, EN 13697 : Actif sur Aspergillus fumigatus et Tricophyton mentagrophytes	20 minutes 15 minutes
Virus	EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin Selon EN 14476 : actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus*, HSV, Rotavirus, Selon EN 14476 : actif sur Polyomavirus SV 40, Coronavirus	30 minutes 1 minute 5 minutes

CONDITIONNEMENTS

1 flacon de 750 ml avec distributeur de mousse diffuse

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectant-en-spray/7468-detergent-desinfectant-surfa-safe-premium-capot-rouge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com