

FICHE PRODUIT

Diffuseur d'aérosol (aérosoliseur) AEROSEPT ULTRA 150

Référence : SOC-AERO417009

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Diffuseur d'aérosol (aérosoliseur) AEROSEPT ULTRA 150

La désinfection par voie aérienne en mode connecté

Caractéristiques

Nébuliseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces par voie aérienne.

- Capacité de traitement : salle de 30 m³ à 150 m³
- Concept breveté : atomiseur ultrasonique
- Nouvelle technologie sans compresseur d'air
- Procédé conforme à la norme NF T 72-281
- 2 modes de fonctionnement :
 - Manuel pour un accès aux informations essentielles
 - Connecté avec pilotage par tablette ou smartphone pour un accès à toutes les options
- Traçabilité sur support numérique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Simplicité d'utilisation
- Simplicité d'entretien (accès à la pompe facilité)
- Pratique, ergonomique et portable

UN TRAITEMENT HOMOGENE

Basé sur le principe d'aérosolisation, l'AEROSEPT ULTRA 150 diffuse une solution qui se répartit de manière homogène sur l'ensemble des surfaces à traiter grâce à une buse ultrasonique.

CE PROCÉDÉ ASSURE :

- Aérosolisation maîtrisée pour une répartition optimale de la solution
- Autorégulation du débit de la buse
- Régulation de la fréquence vibratoire de la buse pour obtenir une granulométrie optimale (taille de la goutte)
- Une concentration parfaitement stabilisée 7ml/m³

UN CONCEPT BREVETÉ

- Utilisation d'une buse avec des céramiques piézo-électriques qui entrent en vibration (fréquence vibratoire très haute = ultrasons).
- Vibration de toute la buse par propagation des ondes.
- Sous l'action de ces vibrations, le liquide que l'on amène à la buse avec une pompe est atomisé en microgouttelettes.
- Les gouttelettes sont ensuite propulsées dans la pièce par le ventilateur.

CONNECTIVITÉ & TRAÇABILITÉ

UNE APPLICATION MOBILE

- Appareil connecté aux smartphones et tablettes (connexion Bluetooth)
- Application téléchargeable sur www.anios.com/fr/apps

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-par-voie-aerienne/7523-appareil-de-desinfection-par-voie-aerienne-aerosept-100vf.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com