

Celltrac

Compteur différentiel de cellules

**Largement utilisé pour des analyses dans les domaines
Hématologie, pathologie, microbiologie et andrologie**

Celltrac est une vraie innovation – le premier compteur différentiel, crée en pensant à l'utilisateur (trice).

Clavier ergonomique adapté à la forme de la main et sensibilité des touches pour une précision maximale, tout en exigeant un minimum de pressions pour éviter la fatigue des doigts.

Un bip accompagne chaque pression de touche, mais il peut être coupé. Les étiquettes ont été nommées de manière à minimiser le déplacement des doigts pour la différenciation des leucocytes standards. De plus, des étiquettes vierges sont fournies pour permettre d'autres applications comme des comptages de mobilité dans le domaine de la fertilité masculine.



Celltrac a 12 touches de comptage, la faculté de soustraire suite à une erreur et la possibilité d'additionner ou de soustraire des groupes cellulaires. Il peut afficher le total cellulaire en cours et les totaux à n'importe quel moment du comptage. Il émet des bips d'alerte en approchant des centaines tout en permettant une standardisation du comptage total à n'importe quel moment. En plus, Celltrac a un indicateur "pile faible" bien qu'il soit peu probable qu'un utilisateur doive la changer dans les 12 premiers mois d'utilisation.

Deux touches cellulaires sont assignées en fonction "Non-somme" pour enregistrer des globules rouges nucléés ou similaire, mais le nombre de touche en fonction "Non-somme" peut être accru ou réduit, pour permettre un choix maximum. Le comptage peut être arrêté à n'importe quel moment pour voir tous les chiffres et pourcentages et peut être ensuite poursuivi ou achevé. Le compte total de leucocytes peut être entré également pour que chaque type cellulaire soit donné en chiffres absolus et en pourcentages.

Celltrac

Compteur différentiel de cellules

Celltrac est fourni avec 10 touches dédiées pour des comptages cellulaires ci-dessous :

SEG :	neutrophiles segmenté
LYM :	lymphocytes
MONO :	monocytes
STAB :	neutrophiles stable
BAS :	basophiles
EOS :	éosinophile
BLST :	myelophiles
PRO :	promyélocytes
MYE :	myélocytes
META :	métamyélocytes

