

Fixateur pour frottis cytologique, aérosol 75 ml

Réf. RER-361400075



Fixateur pour frottis cytologique cytoral REACTIFS RAL en Aérosol 75 ml, Recommandé pour la fixation des frottis cervico-utérins, des urines, des crachats et des liquides broncho-alvéolaires... CytoRAL est un fixateur pour frottis cytologique, il est utilisé pour la fixation des frottis cervico utérins, des urines, des crachats et des liquides broncho-alvéolaires... CytoRAL dépose un film protecteur sur les frottis en les maintenant dans un état d'hydratation convenable jusqu'à la coloration. Il respecte l'aspect d'origine des cellules. Le grand champ de dispersion permet de couvrir toute la lame. Mode opératoire : Préparer le frottis Agiter l'aérosol Vaporiser directement à 15 cm de la lame Laisser sécher à plat 3 min pour que le frottis soit fixé.

- Conditionnement par carton de 12 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration