

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Récupérateurs ou séparateur
d'amalgame mono-poste
COMPACT Dynamic

Récupérateurs ou séparateur d'amalgame mono-poste COMPACT Dynamic

Réf. SOC-SAM



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Le récupérateur d'amalgame mono-poste COMPACT Dynamic se distingue par une fiabilité et une facilité d'entretien extrêmes. La séparation dynamique optimise le fonctionnement du récupérateur même lors de sollicitations extrêmes : pendant la prophylaxie (mousse), avec l'Air-Flow ou pendant les interventions chirurgicales.

La technologie au top du capteur capacitif surveille le niveau de remplissage de l'appareil de l'extérieur. Le capteur capacitif prend ainsi la relève de la sonde plongeante. Le fameux nettoyage de la sonde intérieure, source d'une charge microbienne considérable, appartient au passé.

Pour le nettoyage et la désinfection du système, il suffit d'utiliser un produit adapté pour l'aspiration suivant les indications du fabricant (pex GREEN&CLEAN M2 de METASYS).

Les avantages du COMPACT Dynamic vous convaincront :

- une séparation dynamique prévenant la formation de mousse dans l'appareil et ses dysfonctionnements liés
- un capteur capacitif, garant d'une fiabilité absolue
- le nettoyage du système entier se faisant à travers le conduit d'aspiration, impossible toucher au champ contaminé
- un équipement postérieur grâce à sa construction compacte moyennant des kits spécialement conçus Quand les particules d'amalgame pénètrent dans la nappe phréatique par les eaux usées, le mercure contenu dans l'amalgame devient toxique par transformation en organomercure: 1 g de mercure peut ainsi contaminer jusqu'à 100 000 litres d'eau potable ! Une manipulation correcte et attentive des déchets d'amalgame n'est pas seulement une obligation légale, mais avant tout une responsabilité morale pour la protection de l'environnement.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Avec l'installation d'un récupérateur d'amalgame tout praticien fait face à cette obligation. Les récupérateurs d'amalgame mono-poste de METASYS sont le plus souvent directement installé dans l'unité.

De nombreux fabricants de fauteuils proposent leurs unités déjà pré-équipés avec un récupérateur d'amalgame METASYS. Pour une intégration postérieure dans une unité, les fabricants de fauteuil ou METASYS proposent des kits spécifiques. Si l'intégration directe dans le crachoir s'avère impossible, le récupérateur peut être placé dans un boîtier compact au pied du fauteuil. Avec un récupérateur d'amalgame de METASYS vous vous fiez à la technologie éprouvée du numéro 1 du marché.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N