

Fixateur dentaire kodak 4x1 litre

Réf. SOC-F900331



Produit concentré à diluer pour le développement manuel.

Dose de 250 ml permet d'obtenir 1 litre de solution.

- Changer le révélateur et le fixateur en même temps toutes les 3 semaines ou dès que le révélateur devient marron.
- Couvrir les bacs après utilisation pour éviter l'oxydation des bains par l'air.
- Conserver les solutions à diluer déjà mélangées plutôt que concentrées et entamées afin d'éviter le contact de la chimie avec l'air et donc son oxydation rapide.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration