

Pèse-bébé électronique et pèsepersonne plat pour enfants ③



- Balance multifonctionnelle pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants.
- Nacelle amovible facilement détachable du support.
- Fonction de prise de lait BMIF (Breast Milk Intake).
- Construction robuste pour un transport sans problème.

Convertible et robuste – Qualité compacte et multifonctionnelle

Utilisation à domicile, dans les cabinets de consultation et dans les maternités : le contrôle fiable du poids d'un enfant est décisif pour un bon départ dans la vie. La balance multifonctionnelle seca 384 a été mise au point sur la base de considérations pratiques. Elle peut servir à la fois de pèse-bébé et de pèse-personne plat pour enfants en bas âge.



Balance multifonctionnelle pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants.

La nacelle de la balance seca 384 permet de peser les bébés commodément et en toute sécurité. Grâce à ses formes arrondies et à ses bords relevés, le bébé s'y sent bien et peut être pesé en douceur. En ôtant la nacelle du support on obtient un pèse-personne plat électronique d'une capacité de 20 kg.

Blocage de la nacelle pour une pesée en toute sécurité.

Il suffit d'un geste pour transformer le pèse-bébé en un pèse-personne plat : en appuyant sur une touche, on débloque la jonction entre la nacelle et le support. En position verrouillée, la nacelle reste fixée au support et le pèse-bébé peut être soulevé et transporté sans problème.

Touches de commande fonctionnelles conçues pour une utilisation intuitive.

La balance multifonctionnelle seca 384 est dotée de touches de commandes permettant une utilisation intuitive ne nécessitant pas d'explication. La fonction HOLD mémorise le résultat de la pesée et permet ainsi de s'occuper d'abord du bébé avant d'en noter le poids. Pour une pesée fiable, le poids des langes ou d'un drap doux peuvent être déduits à l'aide de la fonction TARE. La fonction BMIF permet de déterminer la quantité de lait ingérée par le nourrisson lors de l'allaitement. Il suffit en effet d'appuyer sur une touche pour que le résultat de la pesée du nourrisson avant l'allaitement soit mémorisé et soustrait de celui de la pesée après l'allaitement.

Construction robuste pour un transport sans problème.

La construction compacte et robuste de la balance seca 384 la prédestine à une utilisation quotidienne professionnelle mobile pour le suivi médical des petits. L'électronique économe permet jusqu'à 10.000 pesées avec un seul jeu de piles et assure donc l'autonomie et la mobilité de cette balance.



Il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher facilement le plateau de son support.



Caractéristiques techniques

- Capacité : 20 kg
- Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g
- Dimensions (LxHxP) : 552 x 165 x 362 mm
- Dimensions de plateau (LxHxP) : 525 x 80 x 250 mm
- Dimensions de la plateforme (LxHxP) : 280 x 65 x 235 mm
- Poids : 2,8 kg
- Alimentation : piles
- Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, changement de sensibilité, extinction automatique
- En option : sacoches seca 414, seca 413
- Classe d'étalonnage : M_2