

## Set de retrait d'implant stérile (Boîte de 10)

Réf. SOC-202046308



### Set de retrait d'implant à usage unique

L'implant est une contraception très efficace. C'est un bâtonnet souple, de la taille d'une petite allumette, que le médecin pose très superficiellement au niveau du bras. C'est une contraception hormonale.

#### Indications de retrait :

- Disposer le champ stérile.
- Procéder au test de sensibilité et, au besoin, administrer une anesthésie à la lidocaïne.
- Repérage de l'implant : vérifier que l'implant est entier, pousser l'implant par son extrémité proximale afin de faire saillir l'extrémité basse.
- Repérer alors sa position distale sans mobiliser l'implant.
- L'incision longitudinale dans l'axe de l'implant débute au-dessus de l'implant sur quelques millimètres et se termine en avant de son extrémité distale. L'incision peut être également transversale au ras de l'implant. L'implant est poussé. Une fois extériorisé, l'implant est saisi avec une petite pince de Halstead courbée. Il est parfois nécessaire d'inciser la gaine fibreuse qui entoure l'implant et empêche son extraction.
- Désinfection.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Caractéristiques et composition du SET :**

1 Blister dur compartimenté contenant :

- 1 champ troué adhésif 50 x 60 cm,
- 1 bistouri n°11,
- 5 compresses 7.5 x7.5 non-tissé,
- 1 bande de 3 sutures adhésives cutanées,
- 1 bande de contention,
- 1 seringue 2 ml,
- 1 aiguille hypodermique,
- 1 pince de Halstead courbée (mosquito),

Chaque set est emballé sous blister stérile.

**Conditionnement de vente :** Boite de 10 unités



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration