

Dermojet automatique équipé porte-flacon

Réf. SOC-DMJAUTO



Le DERMO JET “automatique” peut indifféremment être équipé d’un flacon ou d’un réservoir (cet article concerne le modèle équipé d’un porte-flacon).

- Poids : 700 grammes environ.
- Fiabilité : Puissant, silencieux, rapide (jusqu'à 1000 injections/Hr)
- Robuste : Réalisé dans des matériaux de haute technologie.
- Ergonomique : Maniable et équilibré, permet une utilisation intensive sans efforts inutiles.
- Esthétique : Appareil aux lignes pure et modernes, entièrement poli.
- Efficace : Muni d’un support de flacon orientable, ce qui permet un fonctionnement dans toutes les positions.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Le Dermojet automatique est en forme de pistolet, l'armement s'effectue par simple action du levier qui libère instantanément, selon le modèle utilisé, des doses régulières de 0,1ml (200 doses avec un flacon de 20ml).

Le Dermojet automatique peut indifféremment être équipé d'un porte-flacon ou d'un réservoir. L'appareil peut recevoir des flacons de différentes contenances (jusqu'à 50ml) qu'il suffit d'enclencher sur son support ; il opère ainsi en circuit fermé ne nécessitant aucun transvasement de liquide. Le praticien qui élabore sa solution médicamenteuse a intérêt à opter pour le réservoir d'une contenance de 20ml (soit environ 200 injections). Le remplissage s'effectue aisément à l'aide d'une seringue en introduisant l'aiguille dans l'orifice situé au-dessus du bouchon (N°475). La graduation du réservoir facilite cette manipulation.

Technique de l'injection :

L'amorçage s'effectue en actionnant plusieurs fois le levier de détente (N° 445) jusqu'à la butée, avant le déclenchement de l'appareil. Si cette phase s'avère inefficace, on peut dévisser et visser plusieurs fois la tête d'injection (sans la retirer).

Une autre méthode consiste à remplir de produit la tête d'injection sur sa partie arrière à l'aide d'une seringue (il s'agit de la partie de la tête vissé sur l'appareil dans laquelle pénètre l'extrémité du piston).

L'appareil doit alors produire un bruit à la fois plus sourd et silencieux.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Pour pratiquer l'injection, amener le levier de détente jusqu'à la butée ; positionnez l'embout de la tête contre la peau, bien perpendiculairement au plan cutané, et appuyez à fond sur le levier avec l'extrémité des doigts.

Le résultat de l'injection est identique à celui de Dermo-Jet médical. Les variations de la profondeur de pénétration sont fonction du site d'injection, de la distance et de l'angle par rapport au plan cutané.

En règle générale, elle varie de 4 à 6mm ; l'apparition d'une papule au sommet de laquelle on peut apercevoir un petit pertuis permet un contrôle visuel immédiat. A noter que la facilité du réarmement permet de doubler ou de tripler la dose sur le même site si la posologie le demande.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration